

CURAPAX®

BRUKSANVISNING



Les alltid
brusanvisningen
før bruk



Fyll pakningen
med vann



Snu pakningen
opp ned og rist
den forsiktig



Varm pakningen
i mikrobølgeovn



Viser temperatur-
måler rødt er
pakningen for varm

OPPVARMING VARMEPAKNING :

1. Pakningen fylles med kaldt eller varmt vann.
2. Snu pakningen opp ned slik at ventilen "låser"
3. Fjern overflødig vann i åpningen
4. Varm opp pakningen i mikrobølgeovn eller inkubator til ønsket temperatur er nådd
5. Klem litt på pakningen før den tas i bruk

KALD PAKNING:

1. Fyll pakningen med kaldt vann eller isvann
2. Snu puten opp ned slik at ventilen "låser"
3. Fjern overflødig vann i åpningen
4. Legg pakningen i kjøleskapet til ønsket temperatur
5. Klem litt på pakningen før den tas i bruk

VARM PAKNING TIL BRUK MED EN GANG:

1. Fyll pakningen med varmt vann med ønsket temperatur.
2. Snu pakningen opp ned slik at ventilen "låser".
3. Fjern overflødig vann i åpningen
4. Pakningen er klar til bruk.
5. Klem litt på pakningen før den tas i bruk.

KALD PAKNING TIL BRUK MED EN GANG:

1. Fyll pakningen med kaldt vann eller isvann.
2. Snu pakningen opp ned slik at ventilen "lukker".
3. Fjern overflødig vann i åpningen.
4. Klem litt på Pakningen før den tas i bruk

FORSIKTIG :

Hvis åpningen ikke er helt tømt er det lett å søle varmt vann / gel . CURAPAX skal bare oppvarmes i en mikrobølgeovn. CURAPAX blir ødelagt eller kan sprenge ved overopphetning. Ta pakningen derfor forsiktig ut av mikrobølgeovnen. Pakningen kan etter oppvarming være varmere enn det føles umiddelbart. Temperaturmåleren blir rød når temperaturen blir ca. 45 grader Celsius. Det er dermed betydelig økt risiko for å bruke produktet. Temperaturmåleren er kun en ekstra veiledende forholdsregel. Bruk sunn fornuft. Pakningen og gelen kan fort bli for varm, selv om temperaturmåleren ikke er rød . Kjenn alltid på pakningen før den tas i bruk. For varm eller for kald pakning kan forårsake skade på hud og underliggende vev. For diabetikere og folk med dårlig sirkulasjon bør varmebehandling etter godkjenning av lege Instruksjon: Vær oppmerksom på at huden hos barn, de eldre, gravide og pasienter med nedsatt følsomhet, kan være spesielt utsatt. Pakningen er KUN for utvortes bruk. Er pakningen skadet kan den ikke brukes, men må kastes

ANBEFALING :

Mikrobølgeovner virker forskjellig. Varm derfor CURAPAX på intervaller av 20 sekunder. Da blir det mest korrekt og gir en individuell følelse av når produktet har fått ønsket temperatur i din mikrobølgeovn

INNHold CURAPAX®:

CURAPAX inneholder PE , PA , PP og superabsorberende polymer (SAP) . Er fri for PVC og latex . Den resulterende gel er ikke-giftig, sikkert for huden og er oppløselig i (sjø) vann. Gelen bør ikke tas , men det skjer , bør du kontakte lege . Gelen er løselig i (sjø) vann . Curapax er et miljøvennlig produkt som kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.